



## Kompatibilität von Produkten mit Desinfektionsmitteln

29.05.2020 / F&E / Candulor AG

Übersicht der Kompatibilität von zahnmedizinischen Produkten und Equipment von Candulor mit Desinfektionsmitteln.

Material / Produkt	Kompatibilität mit Desinfektionslösung				Hinweise
	70% (v/v) i-Propanol (Einwirkdauer: 1min) <sup>1</sup>	70% (v/v) Ethanol (Einwirkdauer: 1min) <sup>2</sup>	0.1% Natriumhypochlorit (Einwirkdauer: 1min) <sup>2</sup>	0.5% Wasserstoffperoxid (Einwirkdauer: 1min) <sup>2</sup>	
<b>Abnehmbare Teil- / Vollprothetik</b> - Zähne - Prothesenmaterial	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	n.a.
<b>Hilfsmaterialien</b> - Wachse	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	n.a.
<b>Löffelmaterial</b> - C-Plast	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	n.a.
<b>Instrumente/ Registrieren</b> - CRS Sets - Bissgabel	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	✓ geeignet	<i>Desinfektion gemäss GI, danach autoklavierbar</i>

<sup>1</sup> [https://vah-online.de/files/download/vah-mitteilungen/2020\\_19Mrz\\_VAH%20Mitteilung%20Händedesinfektion%20Rezepturen%20aktualisiert.pdf](https://vah-online.de/files/download/vah-mitteilungen/2020_19Mrz_VAH%20Mitteilung%20Händedesinfektion%20Rezepturen%20aktualisiert.pdf)

<sup>2</sup> G. Kampf et al. / Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246-251